

## Vervangen van de aan/uit schakelaar van de ERGO-handgreep



Handgreep met het geleverde onderdeel



U schroeft de 8 schroefjes uit de handgreep en haalt deze voorzichtig uit elkaar



Haal voorzichtig de oude schakelaar met het sleepcontact los



Haal voorzichtig met een tangetje de draadjes los van het sleepcontact



Plaats de draadjes op de omcirkelde contactpuntjes van de nieuwe schakelaar



Plaats eerst het sleepcontact en daarna de schakelaar en schroef de handgreep weer dicht.